

Klystersprøjte til behandling af obstipation



Klystersprøjte

Materiale ballon:	Eco friendly PVS
Materiale tud:	PP
Rengøring:	Kold sterilisering eller lunkent vand og sæbe
Størrelser:	115ml, 224ml og 275ml
Skylle væske:	Lunkent vand

Pris: DKK 35,00 pr. stk.

Ref. nr.	JLY-EDB-010	115 ml. Klystersprøjte	Min. bestilling: 20 stk.
Ref. nr.	JLY-EDB-009	224 ml. Klystersprøjte	Min. bestilling: 36 stk.
Ref. nr.	JLY-EDB-005	275 ml. Klystersprøjte	Min. bestilling: 20 stk.

Patientvejledning:

- Fyld klystersprøjten 3/4 op med rent lunkent vand.
- Tilsæt en til to teskefulde antiseptisk opløsning (ifølge lægens anvisning) og bland godt.
- Før i knælende stilling forsigtigt studsens ca. 3-4 cm ind, og skyl ved langsomt at klemme på sprøjten.
- Kropsholdningen bør justeres således, at indholdet af klystersprøjten frit flyder ud af tarmen.
- Kontakt din læge for detaljer om post-colitis behandling og postoperativ pleje.

Bestillinger sendes til info@sacomed.com